

**Schemat mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego w KO Szpitala Rejonowego w Raciborzu**

Lp.	Nazwa sprzętu medycznego	Zalecenia producenta (preparat dezynfekcyjny)	Preparat dezynfekcyjny oraz sposób mycia i dezynfekcji	Miejsce mycia i dezynfekcji sprzętu	Osoba odpowiedzialna
1	Aparat UKG/USG Głowice do aparatu UKG/USG	woda z dodatkiem detergentu	Meliseptol foam pure Meliseptol wipes sensitive Sani Cloth Active Spryskanie i przetrarcie	Gabinet UKG/USG Stanowisko robocze	Pracownik wykonujący badanie
2	Aparat Holter	słaby roztwór dezynfekcyjny lub alkohol	Meliseptol foam pure Meliseptol New Formuła Sani Cloth 70 Spryskanie i przetrarcie	Gabinet Holtera	Pracownik wykonujący badanie
3	Aparat EEG	Elektrody-pod bieżącą wodą, następnie umieścić w roztworze soli fizjologicznej Czepki-pod bieżącą wodą, następnie osuszyć	Elektrody-pod bieżącą wodą, następnie umieszczane w roztworze soli fizjologicznej Czepki-pod bieżącą wodą, następnie osuszane	Gabinet EEG	Pracownik wykonujący badanie
4	Aparat do pomiaru RR	Brak	Meliseptol foam pure Meliseptol New Formuła Spryskanie	Pokój zabiegowy Ambulans	Pielęgniarka, Położna, Lekarz, Ratownik medyczny
5	Aparat do kriodestrukcji tkanek	Brak	Meliseptol foam pure Meliseptol New Formuła Spryskanie i przetrarcie	Stanowisko robocze	Pielęgniarka obsługująca sprzęt
6	Aparaty rentgenowskie	Nawilżona tkanina, łagodny detergent	Meliseptol foam pure Meliseptol New Formuła Meliseptol wipes sensitive Sani Cloth Aktive Spryskanie i przetrarcie	Stanowisko robocze	Personel medyczny
7	Aparat OCUSCAN	Ogólnodostępne środki dezynfekcyjne	Meliseptol wipes sensitive Sani Cloth Active Przetarcie	Pokój badań	Pielęgniarka
8	Aparat Ultra Scan	Ogólnodostępne środki dezynfekcyjne	Meliseptol wipes sensitive Sani Cloth Active Przetarcie	Pokój badań	Pielęgniarka
9	Aparat KTG	Brak	Sani Cloth 70 Przetarcie	Sala porodowa	Położna
10	Audiometr Tympanometr końcówki gumowe	Łagodny środek myjący Detergent dezynfekujący	Meliseptol foam pure Meliseptol wipes sensitive Sani Cloth Active Przemyć i wytrzeć do sucha	Stanowisko robocze	Pielęgniarka wykonująca badanie

11	Auto-Kreato Refraktometr	Powierzchnia na podbródek-środek dezynfekcyjny	Meliseptol foam pure Meliseptol New Formuła Meliseptol wipes sensitive Sani Cloth Active Spryskać i przetrzeć	Stanowisko robocze	Pielęgniarka lub lekarz obsługujący sprzęt
12	Artroskop – wieża	Brak	Meliseptol foam pure Meliseptol New Formuła Meliseptol wipes sensitive Sani Cloth Active Spryskać i przetrzeć	Sala operacyjna	Pielęgniarka obsługująca sprzęt
13	Ambu (Worek samorozprężalny)	Łagodny detergent	Jeden worek dla jednego pacjenta - po użyciu przekazujemy do CS	Pokój zabiegowy Centralna Sterylizatornia	Pielęgniarka, Położna, Ratownik medyczny
14	Bronchoskop	D-ETD, C-ETD	Thermosept ER Thermosept ED	Pomieszczenie do mycia i dezynfekcji Bronchofiberoskopów Myjnia do endoskopów	Pielęgniarka
15	Bipolarny koagulator	Dostępne środki dezynfekcyjne	Meliseptol foam pure Meliseptol New Formuła Spryskać i przetrzeć	Sala operacyjna Pokój zabiegowy	Personel medyczny obsługujący sprzęt
16	Szczelinówka	Dostępne środki dezynfekcyjne	Meliseptol foam pure Meliseptol New Formuła Spryskać i przetrzeć	Pokój badań	Pielęgniarka
17	Butelki do tlenu	Sterylizacja	Przekazujemy do CS	Centralna Sterylizatornia	Pielęgniarka, Położna, Ratownik medyczny
18	Cykloergometr	Nie używać żrących lub odkażających środków chemicznych	Meliseptol foam pure Meliseptol New Formuła Spryskać	Gabinet prób wysiłkowych	Pracownik bezpośrednio po użyciu
19	Defibrylator	Łyżki i obudowa – łagodny roztwór detergentu	Meliseptol foam pure Meliseptol New Formuła Meliseptol wipes sensitive Sani Cloth Active Spryskać, przetrzeć	Pokój zabiegowy Sala operacyjna O/Okulistycznego	Pielęgniarka, Położna, Ratownik medyczny
20	Detektor tętna płodu	Brak	Meliseptol foam pure Meliseptol wipes sensitive Sani Cloth Active Przetarcie	Stanowisko robocze	Położna obsługująca sprzęt
21	Drabinki rehabilitacyjne	Brak	Meliseptol foam pure Meliseptol New Formuła Spryskać	Sala rehabilitacyjna	Pracownik rehabilitacji
22	Deska ortopedyczna	Detergent myjący Detergent dezynfekujący	Meliseptol foam pure Meliseptol New Formuła Perform Spryskać, przetrzeć	Ambulans	Pielęgniarka, Ratownik medyczny
23	Elektrokardiograf	Detergent dezynfekujący łagodnie rozcieńczone mydło	Meliseptol foam pure Meliseptol New Formuła	Stanowisko robocze	Pielęgniarka, Położna, Ratownik medyczny

		rozcieńczony alkohol 1:3	Perform Sani Cloth70 Obudowa-spryskać i przetrzeć Klamry i gruszki-spryskać lub moczyć		
24	Diatermia	Preparaty niealkoholowe lub w przypadku alkoholowych pozostawić do odparowania	Meliseptol foam pure Meliseptol wipes sensitive Sani Cloth Active Spryskać, przetrzeć	Sala operacyjna Pokój zabiegowy	Pielęgniarka
25	Endoskop Optimus	Środki o wysokim środku dezynfekcji i sterylizacji ETO	Thermosept ER Thermosept ED	Pomieszczenie do mycia i dezynfekcji Bronchofiberoskopów Myjnia do endoskopów	Pielęgniarka
26	Fakoemulsyfikator	Ogólnodostępne środki dezynfekcyjne	Meliseptol foam pure Meliseptol New Formuła	Sala operacyjna okulistyki	Pielęgniarka operacyjna
27	Fundyskamera Visucamlite Lampa szczelinowa Siatkówkowy Laser-Visulas	Powierzchnia na podbródek – środek dezynfekcyjny	Meliseptol foam pure Meliseptol New Formuła Spryskać i przetrzeć	Stanowisko robocze	Pielęgniarka i lekarz obsługujący sprzęt
28	Glukometr	70% Alkohol Naturalne środki dezynfekcyjne Łagodny środek czyszczący	Meliseptol foam pure Meliseptol New Formuła Sani Cloth70 Spryskać, przetrzeć	Pokój zabiegowy	Pielęgniarka, Położna, Ratownik medyczny wykonujący pomiar
29	Inhalator ultradźwiękowy	Detergent dezynfekujący	Meliseptol foam pure Viruzyme PCD Spryskać i przetrzeć	Pokój zabiegowy	Pielęgniarka, Ratownik medyczny
30	Kołnierz ortopedyczny	Brak	Meliseptol New Formuła Sani Cloth 70 Spryskać, przetrzeć	Pokój zabiegowy	Pielęgniarka
31	Kapnometr	Alkohol etylowy lub izopropylowy	Sani Cloth 70 Przetrzeć	Ambulans	Pielęgniarka, Ratownik medyczny
32	Kardiomonitor	Detergenty szpitalne Płyn typu CIDEX®	Meliseptol foam pure Meliseptol New Formuła Sani Cloth 70 Przetrzeć wilgotną szmatką	Miejsce pracy urządzenia Pokój zabiegowy Sala pooperacyjna	Pielęgniarka, Położna, Ratownik medyczny
33	Kardiosymulator	Płynny środek myjący nie niszczący tworzyw sztucznych	Meliseptol foam pure Meliseptol wipes sensitive Sani Cloth Active Przetrzeć wilgotną szmatką	Stanowisko robocze	Pielęgniarka
34	Kabina do naświetlań i Grzebień do naświetlań promieniami UV	Indicin	Meliseptol foam pure Meliseptol New Formuła Spryskać i przetrzeć	Stanowisko robocze	Pielęgniarka obsługująca sprzęt
35	Kompaktowy system do naświetlań dłoni i stóp	Indicin	Meliseptol foam pure Meliseptol New Formuła Spryskać i przetrzeć	Stanowisko robocze	Pielęgniarka obsługująca sprzęt

36	Lampa laryngologiczna czołowa	Łagodny środek myjący 70% Spirytus	Sani Cloth70	Pokój zabiegowy	Pielęgniarka
37	Laparoskop: źródło światła, insuflator, pompa ssąco – tłocząca, sterownik do kamery	Preparaty niealkoholowe lub w przypadku alkoholowych pozostawić do odparowania	Meliseptol foam pure Meliseptol New Formuła Meliseptol wipes sensitive Sani Cloth Active Spryskać, przetrzeć	Sala operacyjna	Pielęgniarka operacyjna
38	Łyżki do laryngoskopu	Brak	Po użyciu przekazać do CS	Pokój zabiegowy Centralna Sterylizatornia	Pielęgniarka, Położna, Ratownik medyczny
39	Ładowarki akumulatorów	Brak	Meliseptol foam pure Meliseptol New Formuła Spryskać	Pomieszczenie do tego wyznaczone	Pielęgniarka
40	Mankiety, pompka, gumy do niedokrwienia	Meliseptol foam	Meliseptol foam pure Meliseptol New Formuła Spryskać i przetrzeć	Stanowisko robocze	Pielęgniarka używająca sprzęt
41	Materace gimnastyczne	Brak	Meliseptol foam pure Meliseptol New Formuła Sani Cloth70 Spryskać, przetrzeć	Sala rehabilitacyjna	Pracownik rehabilitacji
42	Materac próżniowy	Detergent dezynfekcyjny	Meliseptol foam pure Meliseptol New Formuła Spryskać	Ambulans	Pielęgniarka, Ratownik medyczny
43	Materace na przewijakach		Meliseptol wipes sensitive Przetrzeć	Stanowisko robocze	Pielęgniarka, położna
44	Mikroskop okulistyczny	Ogólno dostępne środki dezynfekcyjne	Meliseptol foam pure Meliseptol New Formuła Sani Cloth 70	Sala operacyjna okulistyki	Pielęgniarka operacyjna
45	Multifiltrate	Brak	Meliseptol foam pure Meliseptol wipes sensitive Perform Sani Cloth Active Obudowa, ekran-przetrzeć wilgotną szmatką	Sala Intensywnej Terapii	Pielęgniarka
46	Mankiet od monitora	Standardowe preparaty na bazie alkoholu	Meliseptol foam pure Meliseptol New Formuła Spryskać	Sala zabiegowa	Pielęgniarka, Położna, Ratownik medyczny
47	Nosze jezdne typu spencer	Detergent dezynfekujący	Meliseptol foam pure Meliseptol New Formuła Spryskać	Ambulans	Pielęgniarka, Ratownik medyczny
48	Narzędzia chirurgiczne	Brak	Viruton Pre Obficie spryskać	Pokój zabiegowy Centralna Sterylizatornia	Personel medyczny po każdym użyciu
49	Nebulizator Pari Boy	Naturalne środki dezynfekcyjne Spirytus, Desprej, miękka gaza	Meliseptol foam pure Spryskać	Pokój zabiegowy	Pielęgniarka po użyciu sprzętu

50	Pojemnik reimplantacyjny	Detergent dezynfekujący	Meliseptol foam pure	Ambulans	Pielęgniarka, Ratownik medyczny
51	Pompa strzykawkowa, infuzyjna, objętościowa	Wodny roztwór detergenu lub preparat na bazie alkoholu izopropylowego	Meliseptol foam pure Meliseptol New Formuła Meliseptol wipes sensitive Sani Cloth Active Przetrzeć	Pokój zabiegowy Ambulans	Pielęgniarka, Położna, Ratownik medyczny
52	Pompa do żywienia jelitowego-Flocale	Całą powierzchnie przecierać wilgotną ściereczką	Meliseptol foam pure	Stanowisko robocze	Pielęgniarka
53	Podnośnik dla pacjentów	Mycie ciepłą wodą ze środkiem odkażającym, nosidło prać w temp 80°C ze środkiem piorącym	Perform/Incidin Active Meliseptol foam pure Obudowa mycie; nosidło pranie	Stanowisko robocze	Pielęgniarka
54	Polomierz	Ogólnodostępne środki dezynfekcyjne	Meliseptol foam pure Meliseptol New Formuła Przetrzeć	Pokój zabiegowy	Pielęgniarka
55	Pulsoksymetr napalcowy	Brak	Sani Cloth70 Spryskać i przetrzeć	Stanowisko robocze Ambulans	Pielęgniarka, Położna, Ratownik medyczny
56	Reduktor tlenowy	Detergent dezynfekujący	Meliseptol foam pure Meliseptol New Formuła Spryskać i przetrzeć	Pokój zabiegowy Ambulans Stanowisko robocze	Pielęgniarka, Położna, Ratownik medyczny
57	Respirator	Środki na bazie alkoholu, aldehydów i czwartorzędowych związków amonu	Meliseptol foam pure Meliseptol New Formuła Perform/ Incidin Active	Stanowisko robocze Ambulans	Pielęgniarka, Położna, Ratownik medyczny
58	Rolki do przesuwania pacjentów w łóżku	Brak	Meliseptol foam pure Meliseptol New Formuła Spryskać i przetrzeć	Stanowisko robocze	Pielęgniarka, Położna
59	Ssak elektryczny	Roztwór detergenu dezynfekującego	Meliseptol foam pure Meliseptol New Formuła Sani Cloth70 Spryskać i przetrzeć- części obudowy oraz pojemniki po wkładach jedn. zaś pojemniki bez wkładów jedn. przekazujemy do CS	Stanowisko robocze	Pielęgniarka, Położna, Ratownik medyczny
60	Stetoskop	Preparat na bazie alkoholu	Meliseptol New Formuła Santi Cloth 70 Spryskać, przetrzeć	Stanowisko robocze	Pielęgniarka, Położna, Lekarz, Ratownik medyczny
61	Spirometr	Czyszczenie i dezynfekcja przy pomocy wilgotnej szmatki	Meliseptol foam pure- spryskać Sani Cloth Active –przetrzeć Meliseptol wipes sensitive	Stanowisko robocze	Pielęgniarka
62	System ogrzewania pacjenta	Czyścić wilgotną szmatką, roztwór spirytusu	Meliseptol foam pure Meliseptol New Formuła Meliseptol wipes sensitive Sani Cloth Active Spryskać, przetrzeć	Stanowisko robocze	Pielęgniarka

63	Stabilizator kręgosłupa typu KED	Detergent myjący Detergent dezynfekujący	Meliseptol foam pure Spryskać, przetrzeć	Ambulans	Pielęgniarka, Ratownik medyczny
64	Termometr lekarski elektroniczny	Detergent dezynfekująco-myjący	Meliseptol wipes sensitive Przetrzeć	Stanowisko robocze	Pielęgniarka, Położna, Ratownik medyczny
65	Tonometr Aplanacyjny, Tonometr Pachymetr Aut.	Ogólnodostępny środek dezynfekcyjny	Meliseptol wipes sensitive Sani Cloth Active Przetrzeć	Pokój zabiegowy	Pielęgniarka
66	Tonometr, Tonometr komputerowy	Ogólnodostępny środek dezynfekcyjny	Meliseptol foam pure Spryskać, przetrzeć	Pokój zabiegowy	Pielęgniarka
67	Tomograf Soct Copernicus	Powierzchnia na podbródek – środek dezynfekujący	Meliseptol foam pure Meliseptol New Formuła	Stanowisko robocze	Pielęgniarka i lekarz obsługujący sprzęt
68	Ustnik	Brak	Thermosept ED, Thermosept ER	Myjnia / Centralna Sterylizatornia	Pielęgniarka na dyżurze
69	Uprząż pediatryczna	Roztwór wody z mydłem Buraton 10F; Teralin 0,5%, Lysoformin	Meliseptol foam pure Przetrzeć	Ambulans	Pielęgniarka, Ratownik medyczny
70	Videogastroskop	2% Steranios	Aniosyme Synergy 5 2% Steranios	Myjnia w endoskopii	Pielęgniarka
71	Videokolonoskop	2% Steranios	Aniosyme Synergy 5 2% Steranios	Myjnia w endoskopii	Pielęgniarka
72	Videoduodenoskop	2% Steranios	Aniosyme Synergy 5 2% Steranios	Myjnia w endoskopii	Pielęgniarka
73	Waga do ważenia niemowląt	Środki nie zawierające rozpuszczalników	Meliseptol wipes sensitive Przetrzeć	Stanowisko robocze	Pielęgniarka, Położna
74	Autorefraktometr z keratometrem	Ogólne środki dezynfekcyjne	Meliseptol wipes sensitive Sani Cloth Active	Pokój badań	Pielęgniarka
75	Mikroskop spekularny	Ogólne środki dezynfekcyjne	Meliseptol wipes sensitive Sani Cloth Active	Pokój badań	Pielęgniarka